



Littmann®
Stethoscopes

リットマン® ステスコープ
Littmann® Stethoscope

医療従事者を志す方へ



リットマン® ステスコープは、50年以上にわたり世界中の多くの医療従事者に選ばれ、ご愛用いただいております。看護師、医療従事者を志す皆様に、教育現場に、お薦めしたい聴診器です。

リットマン® ステスコープの詳しい情報は
<https://go.solventum.com/NSCAT>

価格は全て“メーカー希望価格(税込)”です。



成人から小児までこれ一器で聴診が可能です。

小児科の実習でもご使用いただけます。


小児用ダイアフラムは、高齢者に多いやせた患者様の聴診にも役立つので、卒業後も長くお使いいただけるモデルです。

一体成型ダイアフラム

リムとダイアフラムの段差が少なくお手入れが簡単です。また、低周波と高周波のモード切り替えが可能なサスペンデッドダイアフラムを採用しています。



リットマン® ステスコープのサスペンデッドダイアフラムは、チェストピースを押さえつける力の強弱を調整することで、高低の周波数レンジを聴き分け、特定の音を識別できます。ベル面へ切り替えの際に、チェストピースを皮膚から離し置きなおす必要がなく、効率的に聴診できます。

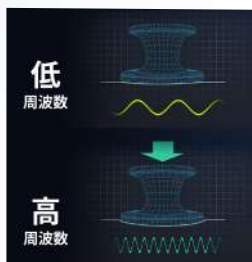

成人・小児兼用 両面チェストピース

チェストピースを回転させることで、両面で聴診が可能です。チェストピースのステム(柄)部分にくぼみがあり、聴診可能な面を見分けることができます。カチッという音がするまでステムを回転させます。



小児用面ダイアフラムは、付属しているノンチルスリーブ※を用いてベル面への変更が可能です。

※肌にあてた時に冷たさを感じさせない素材を使用しています。

ソフトシーリング イヤーチップ

快適なフィット感と遮音性を提供します。ご自身の耳に合わせて交換できる“小”が付いています。



ソフトシーリング・イヤーチップ (大)
＜標準装着＞
ソフトシーリング・イヤーチップ (小)
＜付属＞

イヤーチューブ

外耳道に合わせるための最適な角度に固定されています。常に一定の条件で聴診することができます。


バイノーラル

皮脂に強くしなやかで厚みのあるチューブです。外部からの雑音を遮断し、微弱な音もしっかり伝えます。

聴診器の選び方のコツ

周囲の音を遮断して“聴きたくない音を入れない”
聴診器を選びましょう。

- 1 耳にフィットし、周囲の雑音を遮断するイヤーチップ
- 2 衣服などに擦れた際に摩擦音が聴こえにくく、厚みがあって長すぎないチューブ
- 3 厚く、重みがあり、ぶれずに音を拾えるチェストピース

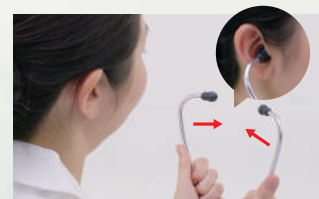

＜正しい挿入方法＞

イヤーチューブは、外耳道にあわせるために最適な角度がついています。写真の図のように正しい方向で耳に挿入してください。

Standard スタンダード



シルク調仕上げ

まるでシルクのような手触り ~リットマン® 聴診器 シルク調仕上げシリーズ

Point1  髪や肌にくっつきにくい サラサラとした質感で、肌・髪・衣服にまとわりつくことなく、快適に使用することができます。スムーズに聴診を行うことができます。	Point2  折り畳みやすい・収納しやすい チューブ同士がくっつかないため簡単にコンパクトに丸めて持ち運ぶことができます。ポケットなどに入れる際に便利です。	Point3  汚れにくく清掃しやすい コーティングによりチューブにゴミや汚れがつきにくいです。また、摩擦が少ないため清掃が簡単で、見た目をキレイに保つことができます。	Point4  傷つきにくく長持ち 皮脂やアルコールに対する耐性が向上しました。これにより、製品の耐久性向上を実現しています。
---	--	--	--

Copper Edition 銅色加工



5809
チョコレート

Black Edition 黒色加工



5803
ブラック

在学中保証で安心してご使用いただけます。

リットマン® ステスコープは、取り扱い説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、在学中は新品交換・無償パーツ交換させていただきます。

リットマン® クラシック III™ ステスコープ

	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	 シルバー	 シルバー	5620	ブラック	 シルバー	¥21,450
			5621	グレー		
			5622	ネイビーブルー		
			5623	カリビアンブルー		
			5627	バーガンディー		
			5630	セイルブルー		
			5633	パールピンク		
			5648	ラズベリー		
			5831	プラム		
			5832	ラベンダー		
			5835	ターコイズ		
			5839	レモンライム		
銅色加工 Copper Edition	 銅色	 銅色	5910C	シャンパンローズ (シルク調仕上げ)	 シルバー	¥22,500
			5912C	マリンブルー (シルク調仕上げ)		
			5809	チョコレート	 銅色	
黒色加工 Black Edition	 ブラック	 ブラック	5803	ブラック	 ブラック	

全長/重さ:約69cm/約150g 販売名:リットマン ステスコープ 一般医療機器 届出番号:13B1X10422000218

リットマン® ライトウェイト II S.E. ステスコープ

軽量モデル

チェストピース: ナース用2ウェイ・楕円形・チェストピース (硬質プラスチック)
ダイヤフラム : サスペンデッド・ダイヤフラム (最長サイズ55mm)
チューブ : シングルチューブ バイノーラル
全長/重さ : 約71cm/約119g

販売名: リットマン ステスコープ
一般医療機器 届出番号: 13B1X10422000218



Standard

2450	ブラック2
2451	バーガンディー 2
2452	カリビアンブルー 2
2454	セイルブルー 2
2456	パールピンク2

リットマン® ライトウェイト II S.E. ステスコープのチューブは、つや消しタイプになります。

希望本体価格 (税込) ¥12,650

リットマン® ネームタグ

バイノーラルに装着できるネームタグです。リットマン® ステスコープ全製品にご使用いただけます。

製品番号	色	入れ目 (個/袋)	希望本体価格 (税込)
2170	ブラック	1	¥1,397



装着イメージ

●本カタログに掲載した全製品のカラー写真につきましては、実物と色調が異なる場合があります。●リットマン® ステスコープには天然ゴムラテックスを使用しておりません。●各製品には「添付文書」「取扱説明書 (日本語)」「保証書 (取扱説明書最終ページ)」が同封されております。●リットマン® ステスコープは、取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、在学中は新品交換、無償パーツ交換させていただきます。●本カタログに記載されている全製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品の価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品は、諸般の事情により発売中止になることがあります。●価格は全てメーカー希望小売価格です。詳細は取扱店までお問合せください。

Solventum およびそのロゴ、Littmann、リットマン、L の Littmann ロゴ、Classic III、クラシック III、その製品名等に使用される商標は Solventum 及びその関連会社の商標です。3M およびそのロゴは 3M およびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。



ソルベンタム合同会社
メディカルサージカル事業部

<https://www.solventum.com/ja-jp/home/>

スリーエムヘルスケアジャパン合同会社はソルベンタム合同会社に社名変更しました。

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2026. All Rights Reserved.
HPM-1192-B(0226)

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-000-470

9:00～17:00/月～金 (土日祝年末年始は除く)